


Instrucciones de prueba para el Paciente

Por favor lea estas instrucciones antes de la prueba auditiva.

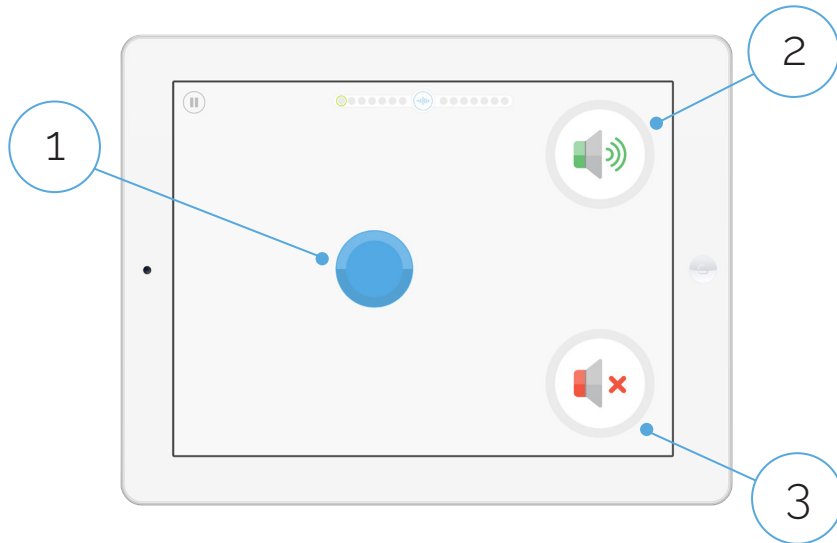

1. Oprima y mantenga oprimido el disco azul para generar un sonido
2. Si usted **escucha un sonido** (aún uno muy tenue), de un golpecito o arrastre el disco azul al icono verde "bocina de sonido"
3. Si usted **no escucha ningún sonido**, de un golpecito o arrastre el disco azul al icono rojo "no hay bocina de sonido"
4. Continúe oprimiendo y moviendo el disco azul hasta haber terminado la prueba

Notas Especiales

- Más de la mitad de las veces, usted no escuchará un sonido al oprimir el disco azul. Esto es normal, y no significa que usted esté haciendo mal la prueba o sufra de pérdida auditiva.
- Usted puede o no escuchar un sonido. Usted puede oprimir el disco azul tantas veces como sea necesario si no está seguro de haber escuchado un sonido.